



Clenny® A

Per Aerosolterapia

Soluzione fisiologica sterile
25 flaconcini monodose da 2 ml



INDICAZIONI

Clenny A è una soluzione fisiologica sterile, particolarmente indicata in aerosolterapia: quantità predefinita di soluzione fisiologica per la diluizione di farmaci da somministrarsi per nebulizzazione.

ATTENZIONE

Attenersi alle istruzioni riportate dal produttore dell'aerosol e a quelle riportate sulle confezioni del farmaco da diluire.

AVVERTENZE

- Il flaconcino, una volta aperto, deve essere utilizzato subito;
- non iniettabile;
- per l'uso in aerosolterapia non usare nei pazienti affetti da gravi patologie respiratorie o cardiovascolari;
- non contiene conservanti e pertanto può essere usato anche per lunghi periodi;
- non disperdere nell'ambiente il contenitore dopo l'uso;
- conservare in ambiente fresco, lontano da fonti di calore ed in confezione integra;
- non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

FREQUENZA D'USO

Secondo necessità e comunque più volte al giorno.

COMPOSIZIONE

Sodio cloruro E.Ph. 18,0 mg Acqua ppi 2,0 ml. Non contiene conservanti.

MODALITÀ D'USO



1

Aprire il flaconcino **Clenny A** ruotando la parte superiore.



2

Premere il flaconcino **Clenny A** sui lati e far uscire la quantità di liquido necessaria.

Astuccio: Carta (PAP 21)

Foglio illustrativo: Carta (PAP 22)

Contenitore monodose: Plastica (LDPE 04)



Raccolta differenziata.

Verifica le disposizioni del tuo Comune.

 **Genetic S.p.A.**
Via G. Della Monica, 26
Castel San Giorgio (SA) Italy

Distribuito da:
Chiesi Italia S.p.A.
Via G. Chiesi, 1 - 43122
Parma (Italia)

CE
0373

 **Chiesi**
CONSUMER HEALTHCARE